



ИНСТРУКЦИЯ

Обесцвечивающий раствор по Граму

Артикул:

05-039

500 мл

Применение: дифференциальная окраска грамположительных и грамотрицательных бактериальных клеток в мазках и срезах тканей.

Состав: спирт изопропиловый, ацетон.

Описание метода:

- 1) Высушить мазок на воздухе
- 2) Раствор кристалвиолета 1 мин.
- 3) Промыть в дистиллированной воде.
- 4) Раствор иода для метода Грама 1-2 мин
- 5) Промыть в дистиллированной воде.
- 6) Обесцвечивающий раствор по Граму 1 мин.
- 7) Промыть в дистиллированной воде.
- 8) Сафранин 1 мин.
- 9) Промыть в дистиллированной воде.
- 10) Просушить препараты на воздухе.

Результаты:

Грамположительные бактерии и дрожжевые клетки – фиолетовые.

Грамотрицательные бактерии – красные.

Срок годности: 24 месяца

Условия хранения: Хранить при температуре: +5+25 °С в плотно закрытой таре.

Номер серии и срок годности указаны на этикетке.

После вскрытия упаковки, продукт годен до конца срока годности, при соблюдении условий хранения.

Сделано в России. Произведено в ООО "ЭргоПродакшн", 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор.39, лит.Н, тел. (812)-305-06-06, для ООО "БиоВитрум", 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.68 А, тел./факс: (812)-305-06-06

По вопросам качества обращаться по адресу: 199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 68, лит. А., тел. +7 (812) 305 0606, info@biovitrum.ru

Изготовлено по ТУ 9398-001-89079081-2012.

РУ № РЗН 2013/775 от 23 марта 2015 года