

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭРГОПРОДАКШН»

ИНСТРУКЦИЯ

Фукусин основной

Применение:

Предназначен для выявления грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Состав: основной фукусин, вода, фенол.

Описание метода:

- 1) Подсушить мазок на воздухе.
- 2) Раствор кристаллического фиолетового 1 минута.
- 3) Промыть в дистиллированной воде.
- 4) Раствор Люголя на 1-2 минуты.
- 5) Промыть в дистиллированной воде.
- 6) Обесцвечивающий раствор 1 минута.
- 7) Промыть в дистиллированной воде.
- 8) Раствор основного фукусина 1 минута.
- 9) Промыть в дистиллированной воде.
- 10) Подсушить на воздухе.
- 11) Исследовать препарат в иммерсионной среде.

Результаты:

Грамположительные микроорганизмы фиолетовые, грамотрицательные микроорганизмы красные.

Срок годности: 24 мес.

Условия хранения: Хранить при температуре: +5+25 °С в плотно закрытой таре.

Номер серии и срок годности указаны на этикетке.

После вскрытия упаковки, продукт годен до конца срока годности, при соблюдении условий хранения.

Сделано в России. Произведено в ООО "ЭргоПродакшн", 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор.39, лит.Н, тел. (812)-305-06-06, для ООО "БиоВитрум", 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.68 А, тел./факс: (812)-305-06-06

По вопросам качества обращаться по адресу: 199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 68, лит. А., тел. +7 (812) 305 0606, info@biovitrum.ru

Изготовлено по ТУ 9398-001-89079081-2012

РУ № РЗН 2013/775 от 23 марта 2015 года